




MEDIT *i*500

Prise d'empreinte optique

La performance
enfin accessible à tous !

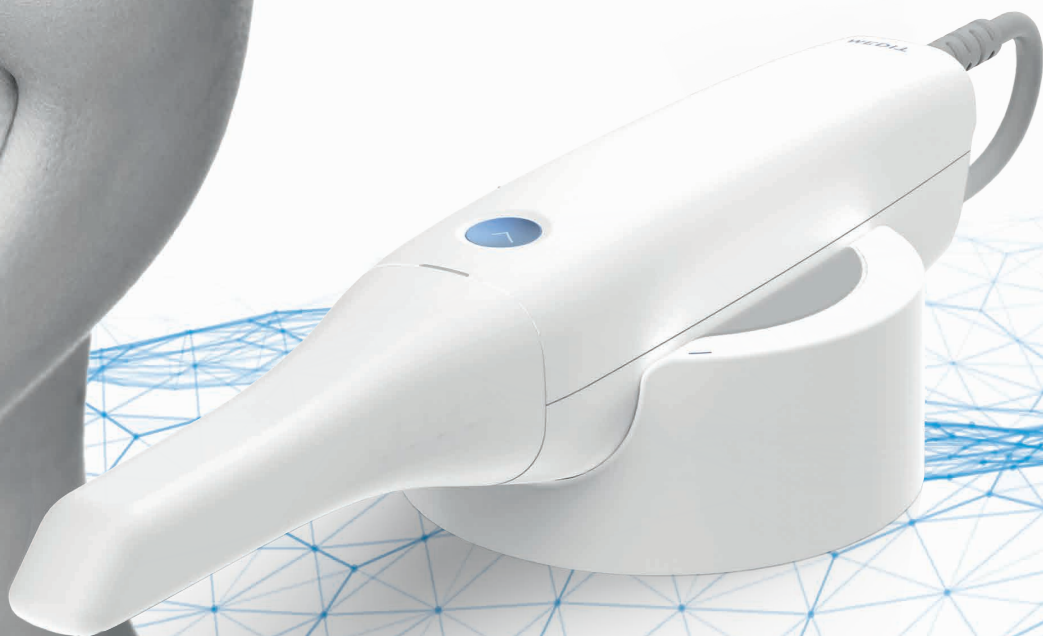

Précision, Puissance, Productivité

En plein développement depuis quelques années, le marché du scanner intra-oral s'est enrichi de caméras toujours plus rapides, toujours plus riches de possibilités, mais toujours aussi difficiles d'accès pour les cabinets ne disposant pas de fortes capacités d'investissement.

Rendre la performance éprouvée des outils de haute technologie accessible au plus grand nombre de chirurgiens-dentistes est la mission première de Labocast 3D, qui vous ouvre aujourd'hui un nouvel espace de progrès.

Avec Medit i500, accédez enfin à :

- **La précision** d'une caméra couleur à un prix compétitif ;
- **La flexibilité** d'un système ouvert pour un flux de travail CFAO intégré ;
- **La vitesse** d'un algorithme de détection de numérisation avec 2 caméras à haute vitesse ;
- **La productivité** d'un système sans poudrage capable de numériser les Inlay-cores.

Le flux tout numérique offre ainsi à votre pratique cette dimension technologique qui renforce la confiance, le confort et la satisfaction des patients. Avec Labocast 3D, cet univers devient le vôtre facilement et rapidement.



**Scanner couleur
Medit i500**
livré avec
son ordinateur portable
ultra-puissant

**Sans licence
annuelle à payer**
Mises à jour gratuites

Tarif
nous consulter



Medit i500

Fiable et confortable



STL

Libre

Système CAD/CAM ouvert : exportez tous vos fichiers STL vers votre laboratoire favori.



Rapide

2 caméras à grande vitesse et 1 algorithme de détection de balayage intelligent, qui reprend la numérisation là où vous l'avez interrompue.



Confortable

Sans poudrage.
Léger et facile à manier.



Ergonomique

Embout fin simple, sûr et stérilisable.



Précision couleur

Haute résolution capable de distinguer la structure dentaire des tissus mous.
Balayages couleur distinguant plaque dentaire, dents, gencives et obturations défailtantes.



Fiable

Fonction Vidéo pour des balayages rapides, des enregistrements détaillés, des données fiables obtenues avec simplicité et rapidité.



One Touch


Un seul bouton de commande pour démarrer et arrêter la numérisation à tout moment sans ordinateur.



Complet

Prise d'empreinte des Inlay-cores.

Une intégration simple et rapide
au système utilisé dans votre cabinet

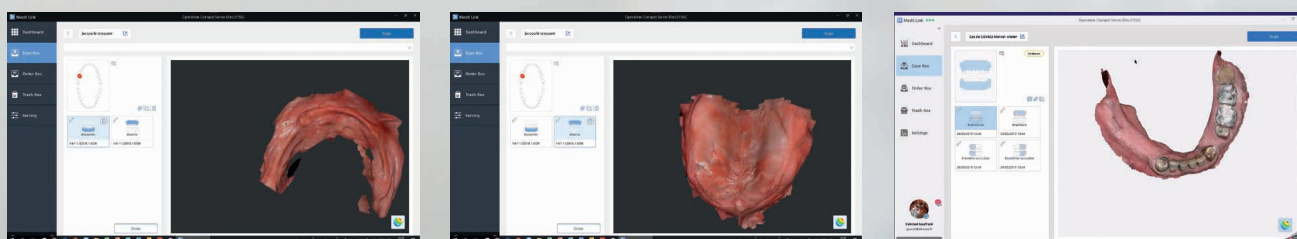


Un logiciel convivial

L'interface utilisateur du logiciel est intuitive et utilise une procédure simplifiée, ce qui vous permet de consacrer moins de temps à la numérisation et davantage au diagnostic et au traitement de votre patient.




Contrôle des contre dépouilles


Cette fonction vous permet d'analyser la zone de contre dépouille en fonction de l'axe d'insertion. Définissez l'axe d'insertion selon la méthode de votre choix : automatique ou manuelle.

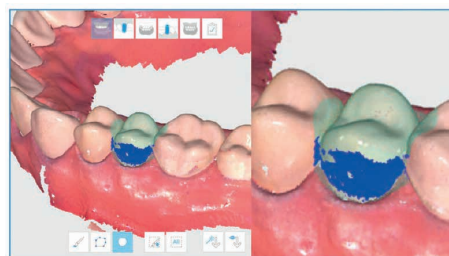

Alignement automatique


Le logiciel de numérisation de l'i500 effectue automatiquement l'alignement des RIM (Relation InterMaxillaire).

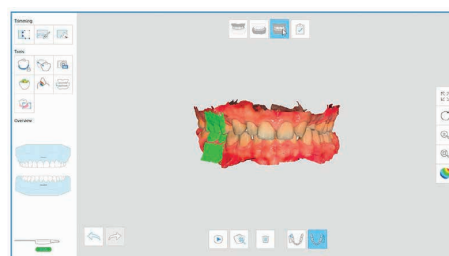

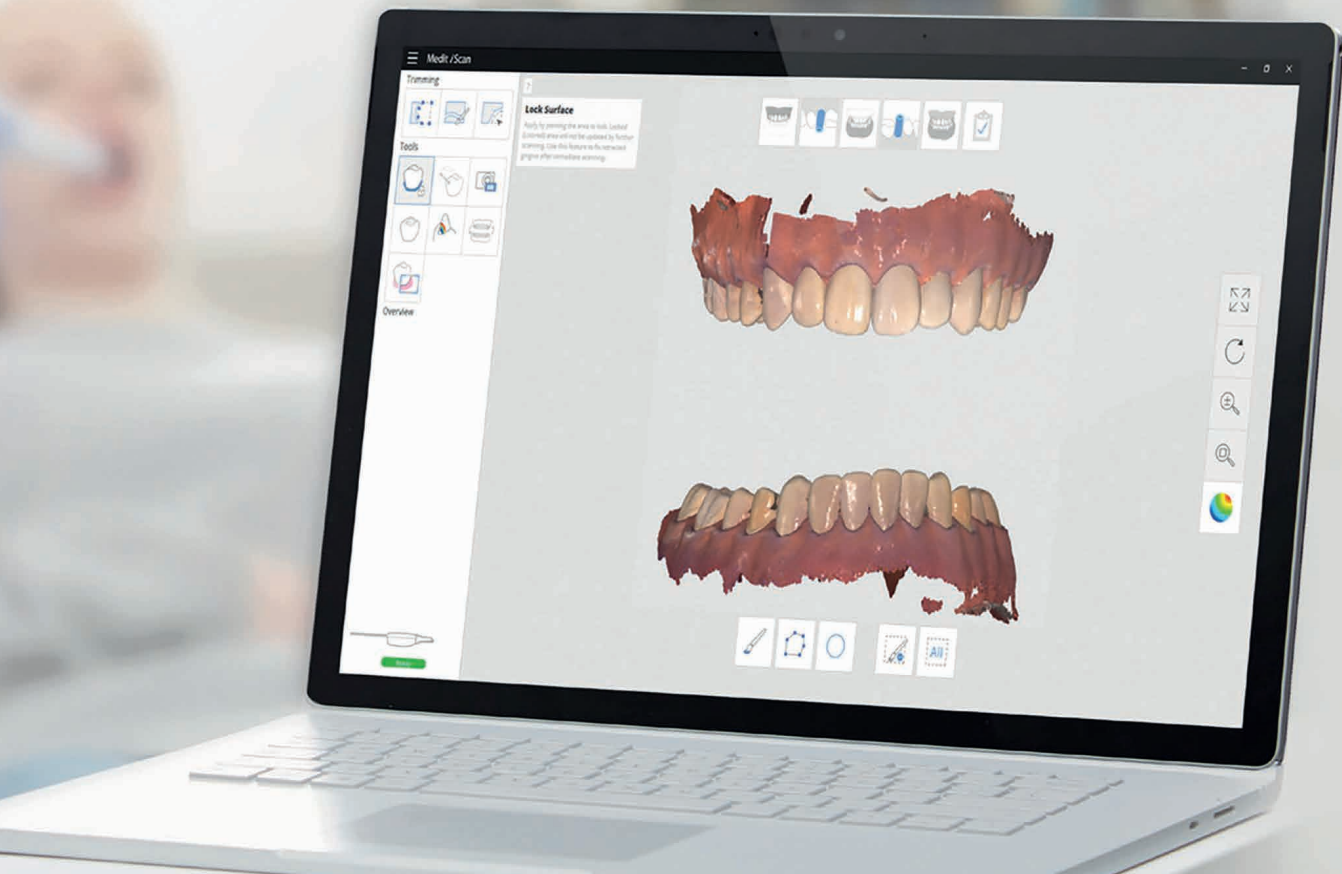


Analyse d'occlusion

Cette fonction affiche l'interférence entre le maxillaire et la mandibule sur une carte en couleur très claire.

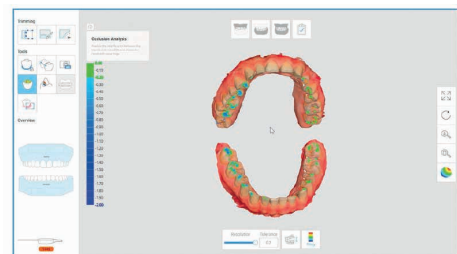


Zone de verrouillage

La zone de numérisation peut être verrouillée par surbrillance. La zone ainsi verrouillée (colorée) ne sera pas mise à jour par la suite. Utilisez cette fonction lors des saignements légers ou pour la détermination précise des limites.

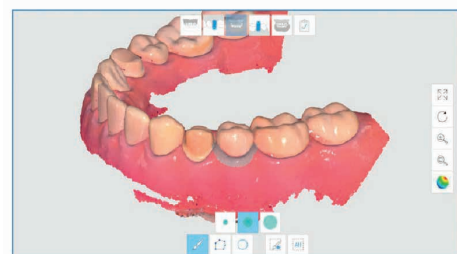

Caméra HD

La capture d'images 2D avec des données de modèle 3D et leur partage avec un laboratoire sont aisés.

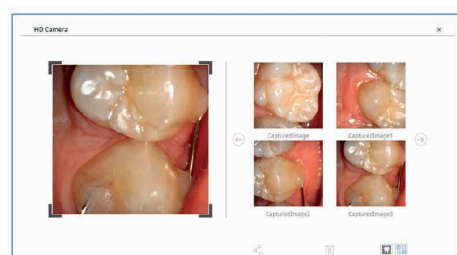

Pensé pour votre pratique

Le nouveau logiciel de gestion des flux de travail et de communication de Medit, Medit Link, est conçu pour améliorer les résultats cliniques.

Son stockage cloud intégré, ses données ouvertes et ses processus CAD quotidiens, associés à des outils de communication et de gestion du flux de travail en temps réel, garantissent des échanges optimaux pour votre cabinet.



One Software
to connect them all

www.meditlink.com



Tableau de bord



Analytique



Visionneuse 3D



Stockage cloud



Communication


Stockage cloud

Medit Link est couplé au stockage cloud pour l'ensemble des fichiers numériques. Ce stockage dans le cloud vous permet d'archiver facilement vos empreintes numériques et d'accéder aux dossiers des patients où que vous soyez.



Communication facile

L'intégration d'options de communication directe vous permet de poser rapidement des questions à vos laboratoires et de garantir des résultats de qualité optimale. Vous améliorez le confort et la satisfaction de vos patients en leur proposant des prothèses de qualité.

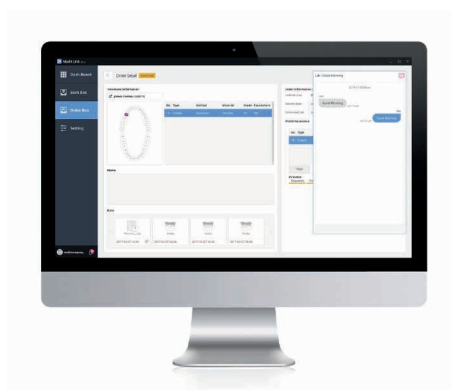

Visionneuse 3D

Une fois le processus de numérisation terminé dans le logiciel de numérisation de l'i500, les données finales peuvent être affichées via la visionneuse 3D de Medit Link.

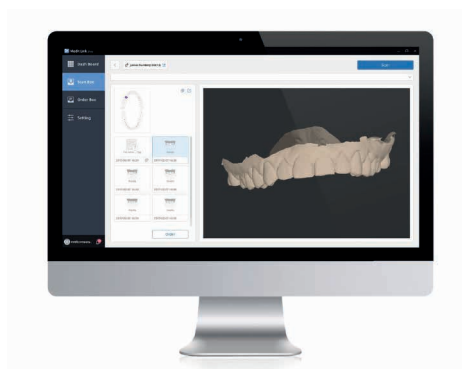


Tableau de bord

Les tableaux de bord efficaces et conviviaux de Medit Link permettent d'accéder rapidement à un résumé de l'ensemble de vos données. Consignez toutes vos informations de commande, les coûts associés, les types de numérisation et les taux de visites des patients et accédez à une gestion optimisée de votre cabinet.



MEDIT *i500*

Medit i500 par Labocast 3D, c'est



La liberté d'un système ouvert

Exportez tous les fichiers ouverts où vous le souhaitez, sans frais.

Et changez d'avis en fonction de vos envies !



La fiabilité d'une formation dispensée par un expert

Notre prothésiste consultant CAD/CAM abordera, au cours d'une formation en intra-entreprise avec toute l'équipe de votre cabinet, tous les aspects de la numérisation intra-buccale.



La sérénité d'une assistance continue à vos côtés

Tout au long de l'intégration de votre nouveau système à votre pratique, vous vous sentirez libre d'adresser vos questions ou problèmes liés à l'utilisation du scanner à l'un de nos spécialistes, joignables par téléphone, e-mail ou teamviewer.



Le plaisir d'échanger et de pratiquer à la pointe de l'innovation

Nous oeuvrons continuellement à l'optimisation de nos processus et produits. Nous vous informerons des dernières évolutions en dentisterie par le biais de nos séminaires en ligne et soirées universitaires.

MEDIT

Pour plus d'informations, nous sommes à votre écoute au 01.53.38.64.66

Labocast3D | 46-56 rue des Orteaux | 75020 Paris | labocast3d@labocast3d.fr | labocast.fr

labocast ^{3D}
MODERN DENTAL GROUP